

NX-SS, EX-SS

TRN015/R2/0407

| | Special Stain 英名 | 特殊染色試薬 製品名 | List Number | Protocol | | Intended Use 染色性、Control Tissue | RUN Temp. | RUN Time |
|----------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------|--|--------------|-------------|
| | | | | Name | Number | | | |
| A | AFB | チール・ネルゼン 試薬キット | 860-027 | AFB -1 | 708 | Standard Protocol (Lighter for 5micron sections) | 37C | 42min |
| | AFB | チール・ネルゼン 試薬キット | 860-027 | AFB -2 | 709 | AFB III Dark, default prptocol | 37C | 42min |
| | Alcian Blue | アルシアン青 試薬キット | 860-002 | Alcian Blue pH2.5 | 601 | Standard Protocol | 60C | 32min |
| | Alcian Blue | アルシアン青 試薬キット | 860-002 | Alcian Blue Dark | 644 | Alcian Blue NFR Darker Counterstain | 60C | 32min |
| | Alcian Yellow | アルシアン黄 試薬キット | 860-017 | Alcian Yellow | 637 | Alcian Yellow Standard Protocol, 5 micron section | R.T. | 43min |
| | Alcian Yellow | アルシアン黄 試薬キット | 860-017 | Alcian Yellow Dark | 707 | Alcian Yellow Dark, 3-4 micron sections | R.T. | 43min |
| | Alcian Yellow | アルシアン黄 試薬キット | 860-017 | Alcian Yellow Extra Dark | (711) | Stains microorganisms more green | R.T. | 50min |
| C | Congo Red | コンゴ赤 試薬キット | 860-026 | Congo Red | 617 | Standard Protocol | 60C | 1Hr 3min |
| E | Elastic | エラスチカ・ワンギーソン 試薬キット | 860-005 | Elastic Stain | 607 | Standard Protocol | 60C | 40min |
| G | Giemsa | ギムザ 試薬キット | 860-006 | Giemsa Stain | 608 | Standard Protocol | 60C | 20min |
| | GMS | グロコット 試薬キット | 860-007 | GMS-Fungus | 609 | Fungus tissue | 60C | 1Hr 20min |
| | GMS | グロコット 試薬キット | 860-007 | GMS-Pneumocystis | 610 | Pneumocystis Carinii, Lung tissue | 60C | 1Hr 15min |
| | GMS | グロコット 試薬キット | 860-007 | GMS-Pneumocystis Dark | 627 | Darker, more intense stain | 60C | 1Hr 20min |
| I | Iron | ベルリン青 試薬キット | 860-009 | Iron Stain | 611 | Standard Protocol | 60C | 31min |
| | Iron | ベルリン青 試薬キット | 860-019 | Iron-NFR-DK | 643 | FE NFR Darker Counterstain | 60C | 31min |
| J | Jones | PAM 試薬キット(H&E) | 860-019 | Jones 1 | 639 | Renal Biopsies | 60C | 1Hr 7min |
| | Jones | PAM 試薬キット(H&E) | 860-019 | Jones 2 | 668 | 4 micron and larger tissue | 60C | 1Hr 11min |
| | Jones | PAM 試薬キット(H&E) | 860-019 | Jones 3 | 669 | 2 or 3 micron sections of tissue | 60C | 1Hr 15min |
| | Jones Light Green | PAM 試薬キット(H&Lt.Green) | 860-020 | Jones LG 1 | 673 | Renal Biopsies | 60C | 1Hr 7min |
| | Jones Light Green | PAM 試薬キット(H&Lt.Green) | 860-020 | Jones LG 2 | 674 | 4 micron and larger tissue | 60C | 1Hr 11min |
| | Jones Light Green | PAM 試薬キット(H&Lt.Green) | 860-020 | Jones LG 3 | 675 | 2 or 3 micron sections of tissue | 60C | 1Hr 15min |
| M | Mucicarmine | ムチカルミン 試薬キット | 860-011 | Mucicarmine Stain | 612 | Standard Protocol | 60C | 35min |
| | Mucicarmine | ムチカルミン 試薬キット | 860-011 | Mucicarmine Dark | 629 | Muci with darker counterstain(20min) | 60C | 52min |
| | Mucicarmine | ムチカルミン 試薬キット | 860-011 | Muci Light Counterstain | 658 | Muci with lighter counterstain than protocol #612 | 60C | 36min |
| P | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Hematoxyin | 603 | Standard PAS/H protocol | 60C | 36min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Diastase:Extra Long | 649 | PAS/D extra long diastase clearance(32min) | 60C | 1Hr 12min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Diastase Long Digest | 604 | PAS/D long diastase clearance(16min) | 60C | 1Hr |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Diastase Short Digest | 605 | PAS/D short diastase clearance(8min) | 60C | 52min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Alcian Blue | 602 | PAS with Alcian Blue staining protocol | 60C | 44min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Light Green | 606 | PAS with Light Green staining protocol | 60C | 36min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Hematoxyin Alcian Blue | 650 | PAS/H with Alcian Blue staining protocol | 60C | 48min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Hematoxyin Light Green | 654 | PAS/H Light Green staining protocol | 60C | 40min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Light Hematoxylin Alc Blue | 715 | PAS with Light Hematoxylin and Alcian Blue staining prptocol | 60C | 44min |
| | PAS | PAS 試薬キット | 860-014 | PAS - Hematoxylin Dark | (712) | Stains basement membrane darker(for derm labs) | 60C | 40min |
| R | Reticulum | 鍍銀 試薬キット | 860-024 | Retic #1 | 682 | Liver, Spleen, 4micron sections | 60C | 1Hr 7min |

NX-SS, EX-SS

TRN015/R2/0407

| Special Stain 英名 | 特殊染色試薬 製品名 | | List Number | Protocol | | Intended Use 染色性、Control Tissue | RUN | RUN | | |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|-----------|-----------|
| | | | | Name | Number | | Temp. | Time | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #2 | 683 | Spleen | 60C | 1Hr 11min | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #3 | 684 | Bone Marrow, needle biopsies, thin sections | 60C | 1Hr 15min | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #1 NFR DK | 688 | Liver, Spleen, 4micron sections with darker Counterstain | 60C | 1Hr 7min | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #1 NO NFR | 685 | Liver, Spleen, 4micron sections with no Counterstain | 60C | 1Hr 7min | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #2 NFR DK | 689 | Spleen with darker NFR Counterstain | 60C | 1Hr 11min | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #2 NO NFR | 686 | Spleen with no Counterstain | 60C | 1Hr 11min | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #3 NFR DK | 690 | Bone Marrow, needle biopsies, thin sections with NFR | 60C | 1Hr 15min | | |
| Reticulum | 鍍銀 | 試薬キット | 860-024 | Retic #3 NO NFR | 687 | Bone Marrow, needle biopsies, thin sections with no Counterstain | 60C | 1Hr 15min | | |
| S | Steiner | ワルチン・スターリー 試薬キット | 860-018 | Steiner 1 | 646 | H. Pylori & Cat Scratch fever | 55C | 57min* | | |
| | Steiner | ワルチン・スターリー 試薬キット | 860-018 | Steiner 2 | 647 | Darker Stain, also Sprochetes | 55C | 57min* | | |
| | Steiner | ワルチン・スターリー 試薬キット | 860-018 | Steiner 3 | 648 | Darker Stain, also Legionaires | 55C | 57min* | | |
| | Steiner | ワルチン・スターリー 試薬キット | 860-018 | Steiner 4 | 706 | New Darkest stain, H. Pylori, Cat Scratch, Legionaires | 55C | 1Hr 5min* | | |
| T | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | #1 | 676 | 4 micron sections, liver and muscle | 60C | 1Hr 32min | |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | #2 | 677 | 2-4 micron sections, kidney with tubular stainig | 60C | 1Hr 32min | |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | Online Bouins | #3 | 678 | 2-4 micron sections, kidney with basement membrane | 60C | 1Hr 32min |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | | #4 | 694 | Increased muscle and collagen stainig | 60C | 1Hr 32min |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | | #5 | 695 | 2 micron liver and gastric sections | 60C | 1Hr 28min |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | | #6 | 696 | 2-4 micron liver sections | 60C | 56min |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | Offline Bouins | #7 | 697 | 2 micron kidney with basement membrane | 60C | 48min |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | | #8 | 698 | 2-4 micron kidney with tubular staining | 60C | 48min |
| | Trichrome | Blue | マッソントリクローム (Blue) 試薬キット | 860-022 | | #9 | 699 | Increased muscle and collagen stainig | 60C | 48min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | | #1 | 679 | 2-4 micron liver & 4 micron muscle sections | 60C | 1Hr 34min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | | #2 | 680 | 4 micron kidney sections | 60C | 1Hr 38min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | Online Bouins | #3 | 681 | 2 micron kidney sections | 60C | 1Hr 25min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | | #4 | 700 | Darker staining of collagen & muscle | 60C | 1Hr 30min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | | #5 | 701 | 2-4 micron liver & 4 micron muscle sections | 60C | 52min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | | #6 | 702 | 2 micron kidney sections | 60C | 48min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | Offline Bouins | #7 | 703 | 4 micron kidney sections | 60C | 48min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | | #8 | 704 | Darker staining of collagen & muscle | 60C | 52min |
| | Trichrome | Green | マッソントリクローム (Green) 試薬キット | 860-023 | | #9 | 705 | Darkest staining of collagen & muscle | 60C | 52min |

Legend: ・プレヒートを充分にかけた時(20分以上)の染色時間は、上記時間より約16分短縮されます(AFB とAlcian Blueを除く)。
 ・上記染色時間は、スライドが1枚の時のものです。2枚以上の場合は、1枚ごとに12秒追加になり、20枚では4分加算となります。
 ・染色性は、切片の厚さにより変わります。
 ・Protocol Numberで、()のプロトコールは開発中のものです。
 *) ワルチン・スターリー クリーニングキットと一緒に並べて染色を開始します。染色後のクリーニング所要時間12分を含みます。